

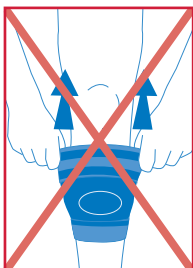
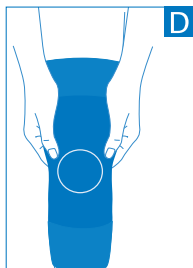
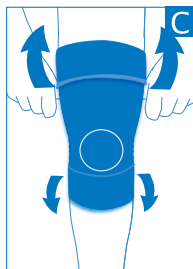


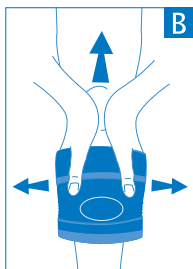


epitact®

INSTRUCCIONES DE USO

PHYSIOstrap™ EPITHELIUMFLEX®

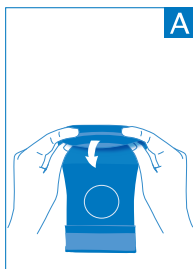

NO TIRAR

INDICACIONES:

El uso de PHYSIOstrap™ EPITHELIUMFLEX® le ayuda a aliviar y proteger una rodilla frágil o dolorida (artrosis, patologías rotulares, fragilidad de ligamentos, etc...). Contribuye a dar una sensación de estabilidad que favorece la reanudación y continuación de las actividades cotidianas, dejando atrás el malestar.

CONTRAINDICACIONES: No use PHYSIOstrap™ si tiene arteritis, insuficiencia venosa importante, secuelas de flebitis o edema (linfático o venoso) de la pierna y/o del muslo ya que podría obstaculizar la circulación sanguínea. No utilice PHYSIOstrap™ con un calcetín o media de contención. No lleve PHYSIOstrap™ sobre una lesión cutánea.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

• Lave PHYSIOstrap™ antes de usarlo por primera vez.

• PHYSIOstrap™ ha sido diseñado para ser utilizado de modo dinámico; **NO USARLO DE MODO PROLONGADO, EN POSICIÓN SENTADA O ACOSTADA.** En posición sentada no plegar la pierna a menos de 90°.



• En caso de sensación de dolor, edema, incomodidad o de cualquier otra reacción anormal, interrumpa el uso del producto y consulte con un médico.

AJUSTE: Para garantizar un ajuste óptimo:

- No aplique cosméticos hidratantes antes de utilizar PHYSIOstrap™.
- Para garantizar una buena sujeción, es necesario lavar el producto antes de cada uso. Como mínimo, lave las bandas elásticas de silicona con agua y jabón (sin frotar) para eliminar cualquier resto de suciedad.

MANTENIMIENTO: Lave PHYSIOstrap™ en la lavadora a 30°C o a mano con agua y jabón (sin frotar), déjelo secar de modo natural. No lo planche.

ERGONOMÍA: Extrafino y discreto, PHYSIOstrap™ EPITHELIUMFLEX® ha sido estudiado especialmente para ser llevado con todo tipo de ropa (pantalones, faldas, etc.). Es un concentrado de tecnología en menos de 40g, no se resbala ni provoca ninguna molestia detrás de la rodilla (pliegue poplíteo).

COMPOSICIÓN: 71% tejido poliamida/elastano, 29% silicona.

Sus componentes han sido objeto de una evaluación de la biocompatibilidad según la norma ISO 10 993-1 relativa a los productos que deben estar en contacto con la piel. No obstante, en caso de producirse un incidente, es conveniente que deje de utilizarlo inmediatamente y prevenga a la sociedad MILLET Innovation. La Sociedad MILLET declina toda responsabilidad en caso de uso no conforme con las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcación CE inicial: 2016.



Lavable a máquina a 30°C.



No usar lejía.



No planchar, ni siquiera a vapor.



No secar en secadora.



No lavar en seco.



Ver embalaje.

