

ORTESIS MUÑECA FLEXIBLE DE ACTIVIDAD

CARP' ACTIV®



ACOMPaña EL MOVIMIENTO DE LA MUÑECA

PATRÓN PATENTADO

COSTURA DESPLAZADA
> Da libertad para los movimientos laterales.

COMODIDAD
> Sin presión sobre el túnel carpiano.



INCISURA FUNCIONAL
> Deja libre el movimiento del pulgar y los movimientos laterales.

PLIEGUE DE COMODIDAD
> Permite abrir naturalmente la mano.

CINTA DE SUJECIÓN
> Favorece que la muñeca vuelva a una posición de reposo.

INDICACIONES:

Se recomienda llevar la ortesis flexible de actividad CARP' ACTIV® durante sus actividades diarias en caso de síndrome del túnel carpiano, de trastornos musculoesqueléticos o de tendinitis de la muñeca.

CONTRAINDICACIONES:

La ortesis no debe estar en contacto con una lesión cutánea.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

No se recomienda para un uso prolongado con el teclado. No usar al lado de una llama o de un cuerpo incandescente.

ESPECIFICIDADES:

La ortesis está diseñada para acompañar los movimientos de la muñeca, pero sin bloquear los dedos. CARP' ACTIV® limita la amplitud y evita las paradas bruscas en los movimientos.

ERGONOMÍA:

Gracias a su tejido técnico y a su patronaje específico patentado, que se ajusta al contorno de la mano, la ortesis flexible aporta un apoyo tranquilizador y una comodidad óptima.

VIDA ÚTIL:

Lavable a máquina en la red de lavado incluida, tiene una larga duración de uso (varios meses).

COMPOSICIÓN: 100% tejido poliamida/elastano.

Los materiales de la ortesis se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2018.



Lavable a máquina a 30°C.



No planchar, ni siquiera a vapor.



No lavar en seco.



No usar lejía.



No secar en secadora.



Ver embalaje.

Producto resultante de la investigación de MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriot/Drôme - FRANCIA



MILLET
INNOVATION

www.epitact.es