

ORTESIS PULGAR FLEXIBLE DE ACTIVIDAD



ACOMPaña EL MOVIMIENTO DEL PULGAR

PATRÓN PATENTADO



INDICACIONES: Durante el día, parece que el pulgar está en reposo, pero en realidad está sometido a repetidos micromovimientos. Estos contribuyen a la evolución de la rizartrrosis y pueden provocar brotes inflamatorios dolorosos. Llevar a diario la ortesis flexible EPITACT® ayuda a aliviar los dolores articulares en la base del pulgar (rizartrrosis), ya que limita los micromovimientos traumatizantes.

CONTRAINDICACIONES:

No usar sobre una lesión cutánea. En caso de edema importante: vigilar la mano durante su uso. Retirar el dispositivo si el cierre está demasiado apretado e impide la circulación. En caso de duda, solicite consejo a su médico o a su farmacéutico.

PRECAUCIONES DE USO:

Lavar antes del primer uso. Este producto es una ortesis de día. No utilizar cerca de una llama o de un cuerpo incandescente.

ESPECIFICIDADES: Gracias a su tendón de EPITHELIUMFLEX®, mantiene al pulgar en posición de reposo. Si se lleva a diario, permite conservar completamente la funcionalidad de la mano.

ERGONOMÍA:

Diseñada para adaptarse a las exigencias de la vida diaria, la ortesis activa flexible no lleva ningún «Velcro®» agresivo, que pueda estropear la ropa. Fina y discreta, le permite seguir llevado su reloj o sus joyas.

VIDA ÚTIL:

Lavable a máquina en la red de lavado incluida, tiene una larga duración de uso (varios meses).

COMPOSICIÓN: 86% tejido poliamida/elastano, 14% silicona.

Los materiales de la ortesis se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation. MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2013.



Lavable a máquina a 30°C.



No planchar, ni siquiera a vapor.



No lavar en seco.



No usar lejía.



No secar en secadora.



Ver embalaje.

Producto resultante de la investigación de MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriot/Drôme - FRANCIA



MILLET
INNOVATION

www.epitact.es